




吉为医疗
JIWEI MEDICAL

适用于各类手术后引流导管的固定，保护创口，引流畅通，减少导管移位和意外拔管带来的风险。

(吉易固)[®]

固定器

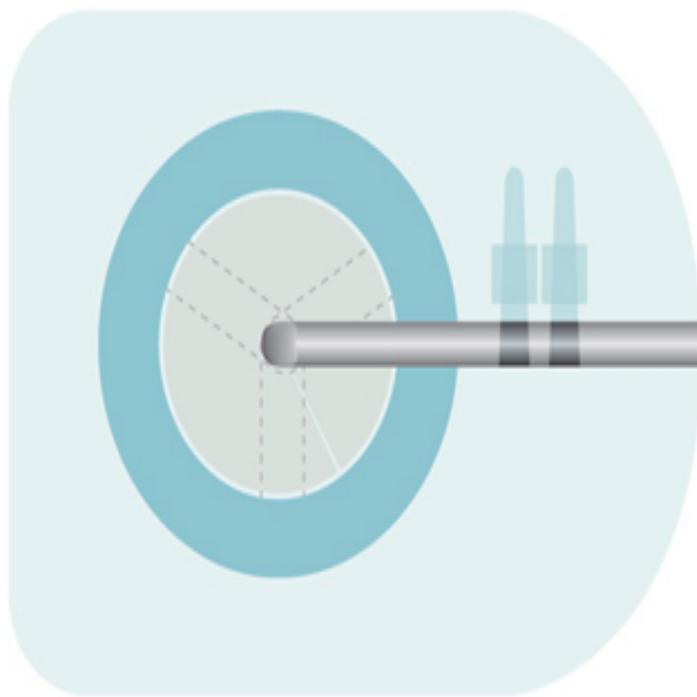

工作原理

固定器主要包括固定装置、胶贴和吸水垫。由胶贴将固定装置粘贴在患者皮肤上，通过固定装置将导管相对于患者皮肤保持固定，避免牵拉导管引起的脱落和疼痛。吸水垫置于导管出口处，吸收导管出口周围的渗液，使导管周围保持相对清洁的环境，从而防止伤口感染。

产品型号：X型

产品规格：

X15

X20

X25

X30

X35

X40

灭菌级

STERILE

R

辐照灭菌



一次性使用



吉为医疗

JIWEI MEDICAL

进口胶贴、低致敏性；
透气舒适，粘贴牢固；
双重固定，可调口径；
可视观察，吸渗固液；

结构组成

STRUCTURE COMPOSITION

产品由胶贴、旋转环、内箍、内箍解锁键、外箍扣件、外箍、外箍拉环、吸水垫组成。

适用范围

用于固定放入患者体内的非血管性导管，协助减少导管移动及偶发性脱移。

使用方法

- 1.导管出口对准旋转环中心后，分别撕除胶贴背面离型纸，将产品紧密粘贴在导管周围皮肤。
- 2.将一片吸水垫卡住导管，放置于产品内圈底部，紧贴皮肤。
- 3.顺时针拧动旋转环，使内箍卡住导管；再将导管放在外箍上，弯曲外箍使导管固定。

杭州吉为医疗科技有限公司

HANGZHOU JIWEI MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

生产许可证编号：浙食药监械生产许20130071号

注册证编号/产品技术要求编号：浙械注准20192140565

注册人/生产企业/售后服务单位：杭州吉为医疗科技有限公司

生产地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2636号1幢3层312室

联系电话：0571-89187013

传真：0571-88669807

网址：www.jiwei-med.com

禁忌症

对压敏胶带过敏者遵医嘱使用。感染伤口者、
渗液过多者、导管周围皮肤缺损者禁用

贮存

-10℃ -30℃，阴凉、干燥处储藏